


mondiale

kinmaku beat KB1

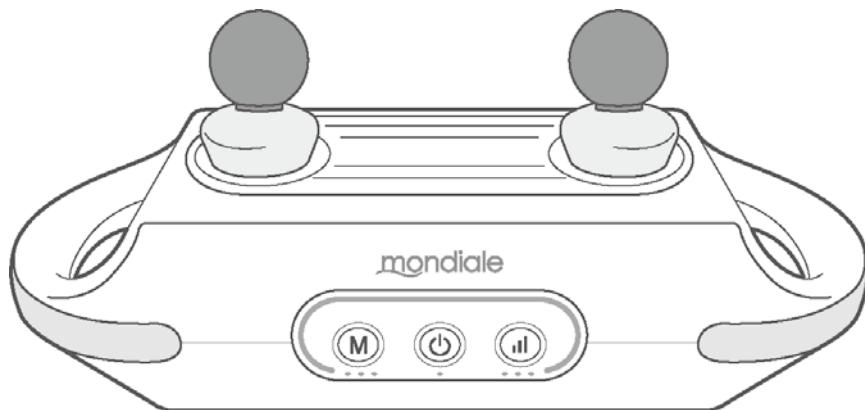

モンデール 筋膜ビート KB1 取扱説明書

ご使用の前に本書を必ずお読みの上、正しく安全にご使用ください。
本書は大切に保管してください。

■ 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、貴方や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。

また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

△ **危険:** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

△ **警告:** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

△ **注意:** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

絵表示の例

（×）このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」です。

（！）このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに
必ず保管してください。

<免責事項について>

- ・地震や水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中止など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与していない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・外観・仕様は製品の改良等により予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。

⚠ 危険

- ⓧ 次のような医用電子機器や家庭用電気治療器を使用している方は使用しないでください。
 - ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
 - ・人工心肺などの生命維持用電子機器
 - ・心電計などの装着型の医用電子機器

医用電気機器や家庭用電気治療器の誤作動を招くおそれがあります。

⚠ 警告

- ⓧ 取扱説明書上にある使用方法以外では使用しないでください。

事故やトラブルのおそれがあります。

- ⓧ 頭部、首、胸部、ひじ、ひざなどの骨部には使用しないでください。
- ⓧ 妊娠中あるいは妊娠の可能性がある方、出産直後の方は使用しないでください。
- ⓧ 医師からマッサージを禁じられている方は使用しないでください。
例) 血栓症、塞栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

事故やけが、体調不良の原因になります。

- ⓧ 次のような時は使用しないでください。
 - ・体調がすぐれない時や発熱時・飲酒時・薬を服用した時・疲労が激しい時
 - ・製品使用部位にけがや痛みがある時・生理中

- ❗ 医師の治療を受けている時や次のような方は必ず医師と相談の上、使用してください。
 - ・心臓疾患・有熱性疾患・急性疾患・感染症疾患・血圧異常・血友病疾患
 - ・悪性腫瘍・てんかん・骨粗しょう症・結核性疾患・伝染性疾患・急性疾患(疼痛性)・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
 - ・製品使用部位に皮膚病(黒皮病、アトピー性皮膚炎、色素異常、その他皮膚疾患)のある方、またはあった方

事故や健康を害するおそれがあります。

- ⓧ 乳幼児や子供、自分で意思表示のできない人に使用させたり、遊ばせたりしないでください。また、ペットに使用しないでください。乳幼児や子供の手の届くところで使用、保管はしないでください。

事故やけが、体調不良の原因になります。

- ⓧ 痛くないレベルで使用していただき、過度な連続使用はしないでください。
- ⓧ 本体の上に立ったり、本体に全体重をあずけないでください。

けがや故障の原因になります。

⚠ 警 告

- 🚫 火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに放置しないでください。また、火中投入、加熱、高温での使用をしないでください。熱器具には近づけないでください。

破裂、発熱、発火、故障の原因になります。

- 🚫 充電ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを乗せたり、挟み込んだり、高温部に近づけないでください。

充電ケーブルが破損し、火災や感電の原因になります。

- 🚫 本体に充電ケーブルを巻き付けないでください。また、充電ケーブルを束ねたままで使用しないでください。

充電ケーブルがねじれて断線、ショート、火災、感電の原因になります。

- 🚫 ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。ほこりやごみは付着させないでください。また、傷んだACアダプター、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

感電、ショート、発火の原因になります。

- 🚫 濡れた手でACアダプターの抜き差しをしないでください。また、身体が濡れた状態で本製品を使用しないでください。

感電のおそれがあります。

- 🚫 本体の本体側プラグ差込口からプラグを抜く時や、コンセントからACアダプターを抜く時はケーブルを持たずに根元を持って垂直に引き抜いてください。

断線や感電、ショート、発火の原因になります。

- 🚫 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。

たこ足配線などで定格を超えると、発火による火災の原因になります。

- 🚫 使用中または充電中に煙が出る、異臭や異音がする、発熱するなどの異常がおきたら、直ちに電源を切り、充電中の場合は AC アダプターをコンセントから抜いてください。

火災などの原因になります。

- 🚫 お手入れをする時には必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

感電、ショート、発火の原因になります。

- 🚫 お客様ご自身で分解や修理・改造はしないでください。

感電や火災、事故やけが、故障の原因になります。

- ❗ 使用部位に装身具を付けて使用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。

⚠ 警 告

- !**使用前に本体やアタッチメントに異常や損傷がないか確認をしてください。異常や損傷がある場合は使用しないでください。**

感電やけがのおそれがあります。

- !**使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。**

事故やトラブルのおそれがあります。

⚠ 注意

- !**本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。**

事故やトラブルのおそれがあります。

- !**不安定な場所で保管しないでください。また、本体や付属品を落としたりぶつけたりしないでください。**

けがや故障の原因になります。

- !**使用中に眠らないでください。**

事故やけがの原因になります。

- !**肌の弱い方は素肌に使用しないでください。**

皮ふを痛める原因になります。

- !**強く押し付けたり、長く同じところに当て続けないでください。**

事故やけが、皮ふを痛める原因になります。

- !**本体を移動させるとときは電源を切り、両手でかかえるかハンドルをしっかりとつかんで持ち運んでください。**

落下によるけがや製品破損のおそれがあります。

- !**1回の使用時間は15分以内とし、1日あたりの使用時間は通算して30分以内としてください。また、同一箇所への連続使用は5分以内を目安にしてください。**

過度な使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因になります。

- !**はじめは弱い振動レベル・短時間から使用してください。**

けがや体調不良の原因になります。


- !**付属のアタッチメントを取り付けてから使用してください。**

- !**使用中、髪や指などが巻き込まれないようにしてください。**

事故やけがのおそれがあります。

■ 各部の名称

本体

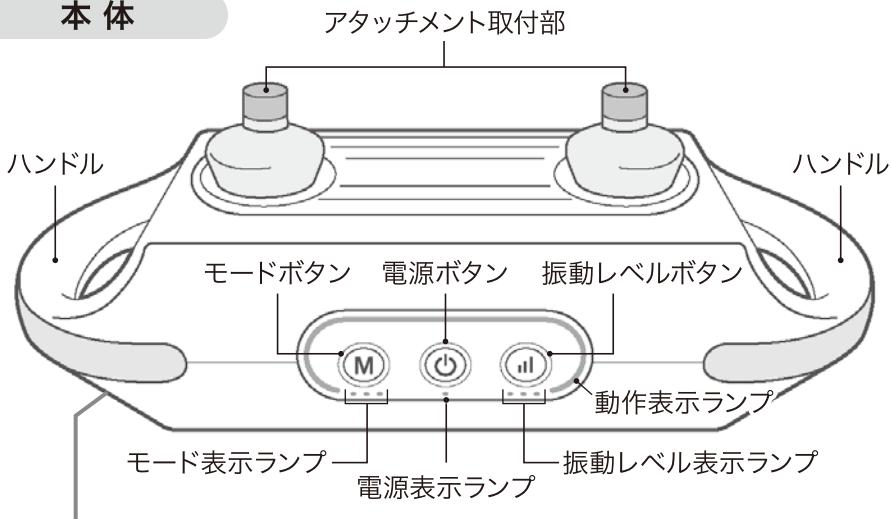


本体背面

本体側プラグ差込口

クッション



ACアダプター

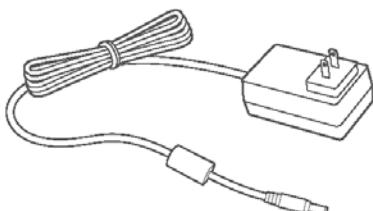


アタッチメント取付部

アタッチメント

● ボールアタッチメント

点で気になる箇所をピンポイントにケア

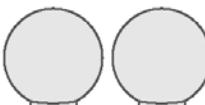

● フラットアタッチメント

面で広範囲を効率的にケア



● ウェーブアタッチメント

凹みに合わせて腕、ふくらはぎ、足首など
パーツを乗せたケアが可能



■ ご使用の前に

安全装置について

アタッチメントを強く押し付け過ぎるなど過度に負荷がかかった場合、安全装置が働き動作が停止することがあります。続けて使用する場合は、電源ボタンを長押しして再度電源を入れてください。

オートタイマーについて

使いすぎや切り忘れを防止するため、約15分で運転を停止します。

充電のしかた

1 ACアダプターのプラグを本体の本体側プラグ差込口につなぎます。

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

2 ACアダプターをコンセントに差し込みます。

正しく確実に差し込んでください。

・充電中は電源表示ランプが赤色に点滅し、充電が完了すると青色に点灯します。


・満充電までの所要時間は約3時間です。

※充電環境等により充電時間は前後します。

※電池の残量によって充電時間が短くなる場合があります。

・満充電の状態で約2時間使用できます。

・充電中は動きません。

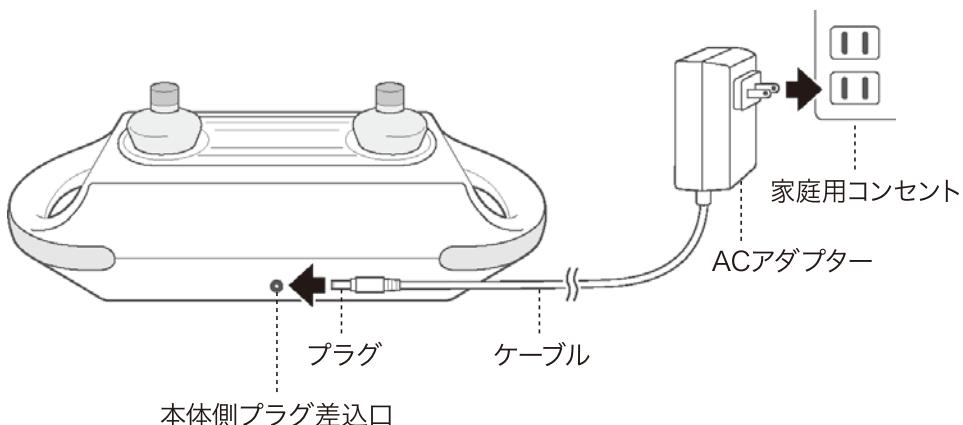

■ ご使用の前に（つづき）


アタッチメントの取り付け・外しかた

△ 必ず動作を停止させてから行ってください

取り付けかた

各アタッチメント底面の凹みを本体のアタッチメント取付部に合わせて、垂直に奥まで差し込んでください。フラットアタッチメントとウェーブアタッチメントは両端を持ち、均一な力で差し込んでください。

※無理な方向から差し込むと破損の原因となります。

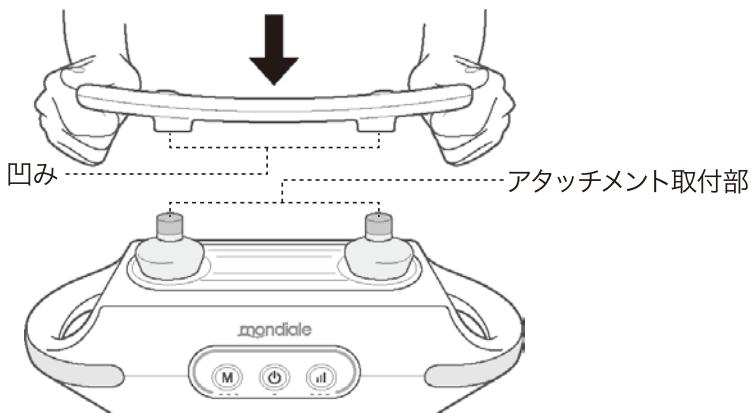

取り外しかた


本体を安定した平らな面に置いてください。本体が動かないように固定し、アタッチメントを垂直にゆっくりと引き抜いてください。

■ 使いかた

△ 注意

- ・1回の使用時間は15分以内とし、1日あたりの使用時間は通算して30分以内としてください。また、同一箇所への連続使用は5分以内を目標にしてください。
- ・使いはじめは弱い振動レベル・短時間から使用してください。
- ・本体の上に立ったり、本体に全体重をあずけないでください。
- ・背骨に異常がある方や背骨が曲がっている方は背面（腰や背中）への使用はおやめください。

1 アタッチメントが奥までしっかりと取り付けられていることを確認し、電源ボタンを長押しして電源を入れます。

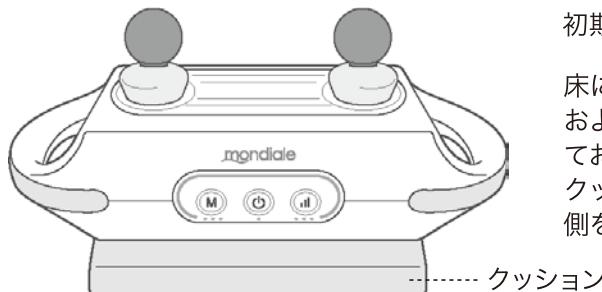

初期設定：連続タップ、振動レベル2

床に置いて使用する場合、床面保護および防音のためクッションを敷いてお使いください。

クッションは滑り止めがついている側を下にしてください。

2 モードボタンを短押ししてモードを3つの中から選びます。

選択中のモードは、モード表示ランプで確認できます。

連続タップ（初期設定）
モード表示ランプ
○ ○ ○

ショートタップ
モード表示ランプ
○ ○ ○

ミドルタップ
モード表示ランプ
○ ○ ○

3 振動レベルボタンを短押しして振動レベルを3つの中から選びます。

選択中の振動レベルは、振動レベル表示ランプで確認できます。

レベル2（初期設定）
振動回数2600回/分
振動レベル表示ランプ
○ ○ ○

レベル3
振動回数3200回/分
振動レベル表示ランプ
○ ○ ○

レベル1
振動回数2000回/分
振動レベル表示ランプ
○ ○ ○

4 使い終わったら、電源ボタンを長押しして電源を切ります。

電池残量がわずかになると、動作中に電源表示ランプが赤く点滅します。その場合は充電を行ってください。


■ 使用例

ボールアタッチメント




足裏乗せ

本体を床に置き、椅子などに座った状態でアタッチメントに足裏を乗せます。

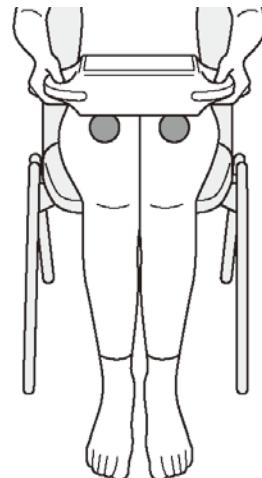


太もも当て

椅子などに座った状態で本体を両手で持ち、アタッチメントを太ももに当てます。

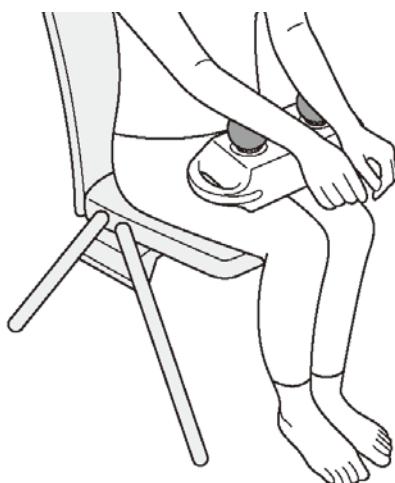

腕乗せ

椅子などに座った状態で本体を太ももに乗せ、アタッチメントに両腕を乗せます。

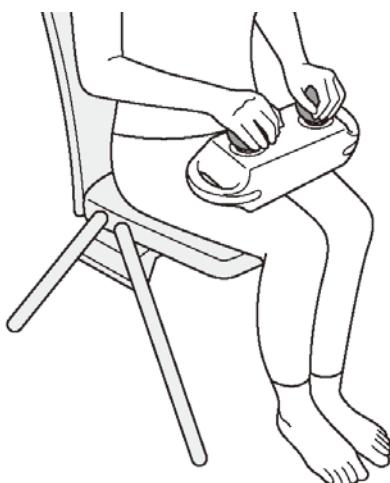

手のひら乗せ

椅子などに座った状態で本体を太ももに乗せ、アタッチメントを両手で軽くつかみます。


■ 使用例（つづき）

ボールアタッチメント



お腹当て

椅子などに座った状態で本体を両手で持ち、アタッチメントをお腹に当てます。

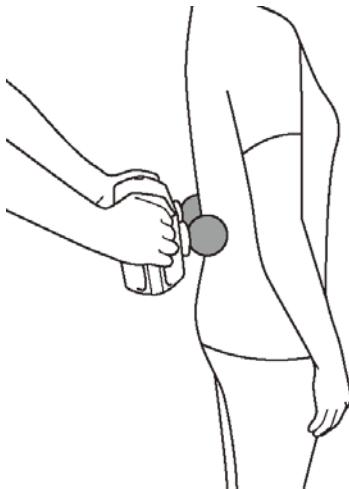


腰当て（2人で）

パートナーに本体を両手で持ってもらい、腰に当ててもらいます。



ふくらはぎ乗せ（本体横置き）

本体を横にして床に置き、床に座った状態で両足のふくらはぎをアタッチメントに乗せます。

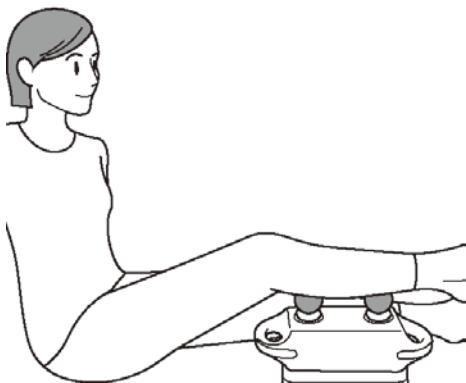


ふくらはぎ乗せ（本体縦置き）

本体を縦にして床に置き、床に座った状態で片足のふくらはぎをアタッチメントに乗せます。


■ 使用例（つづき）

フラットアタッチメント

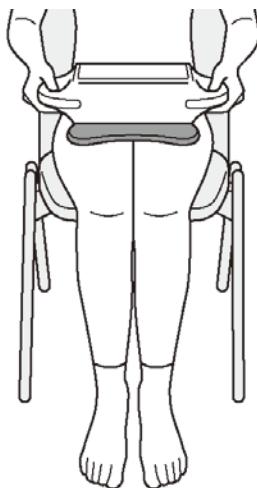

太もも乗せ

椅子などに座った状態で本体を両手で持ち、アタッチメントを太ももに当てます。

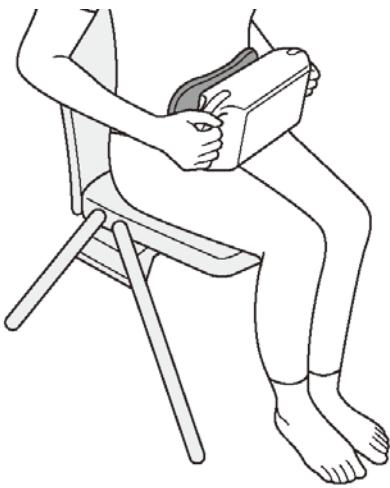

お腹当て

椅子などに座った状態で本体を両手で持ち、アタッチメントをお腹に当てます。




腰当て（2人で）

パートナーに本体を両手で持ってもらい、腰に当ててもらいます。

■ 使用例（つづき）

ウェーブアタッチメント

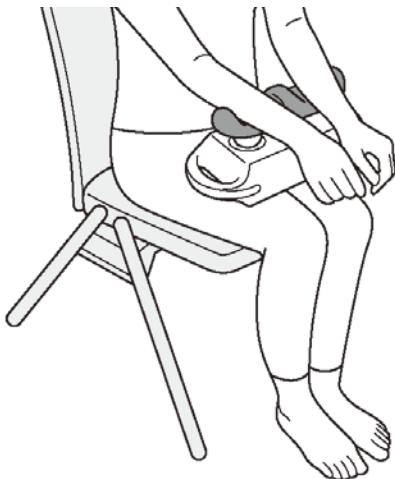


腕乗せ

椅子などに座った状態で本体を太ももに乗せ、アタッチメントに両腕を乗せます。



足首／ふくらはぎ乗せ①

床に座った状態で足首またはふくらはぎをアタッチメントに乗せます。

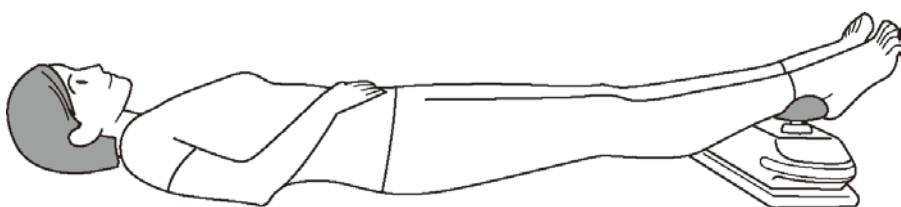

足首／ふくらはぎ乗せ②

本体を床に置き、体も横になった状態で足首またはふくらはぎをアタッチメントに乗せます。

■ お手入れと保管のしかた

お手入れのしかた



必ず動作を停止させてから行ってください

- 本体はやわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯にうすめた中性洗剤を含ませた布をよくしぼってから拭き取ってください。仕上げに乾いた布で水分をふき取ってください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。水没させたり、水を直接かけて洗浄を行わないでください。

保管のしかた

- コンセントからACアダプターを抜いて保管してください。
- 次回の使用に支障のないように汚れやホコリを取った後、湿気の少ないところに整理・保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。本製品を破棄される場合は、自治体の分別ルールに従って破棄してください。



■ 故障かなと思ったら

故障かなと思ったら下記の点をもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。絶対にご自分で分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

症状	確認していただくこと
電源を入れても動かない	<ul style="list-style-type: none">・ACアダプターのプラグと本体の本体側プラグ差込口、ACアダプターとコンセントがきちんと接続されているか確認してください。・電源ボタンを数秒間長押ししてください。・再度充電を行ってください。
突然停止した	<ul style="list-style-type: none">・オートタイマーにより約15分で自動的に停止します。・再度充電を行ってください。・アタッチメントを強く押し当てるとき安全のために動作が停止することがあります。強く押し当てないようにご使用ください。
異音がする	<ul style="list-style-type: none">・本体は構造上、ある程度の動作音がします。異常ではありません。

■ 充電式電池について

- ・充電式電池は消耗品です。充電を繰り返すと、使用できる時間が少しずつ短くなります。
- ・電池の特性上、初めてお使いの時や半年以上使わなかった時は電池の性能が低下している場合があります。半年以上使用しない場合は電池が劣化します。半年に一度は50%程度充電してください。
- ・周囲の温度が高すぎたり、低すぎたりすると、充電効率が悪く充電できない場合があります。また、電池が劣化する原因にもなります。
- ・充電池の寿命は使用状況、保管方法などの状態により大きく変化します。

■ 仕様

電 源	充電式
使 用 電 池	リチウムイオン電池 DC22.2V 1800mAh
消 費 電 力	約 26W
本 体 尺 法	約 W364xD144xH125mm(アタッチメント除く)
本 体 重 量	約 2Kg(アタッチメント除く)
材 質	本体:ABS、ハンドル部分:TPR ボールアタッチメント:EVA フラットアタッチメント:ABS ウェーブアタッチメント:PU Foam
原 産 国	中国

■ ACアダプター

入 力	AC100-240V 50/60Hz
出 力	DC26V 1A

※製品の仕様およびデザインは性能・機能向上のため予告なく変更する場合があります。

■ 愛情点検について

 愛情点検	このような症状はありませんか? <ul style="list-style-type: none">●煙が出たり、異常ににおいや音がする●ACアダプターが異常に熱い●コードを動かすと通電したりしなかったりする●その他異常がある	 ご使用中止 故障や事故防止のため、電源を切りACアダプターを外して、必ずお買い上げの販売店または販売元に点検・修理をご相談ください。
---	---	---

■ 破棄について

お住まいの自治体の分別ルールに従って破棄をしてください。

■ 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。修理・交換に際しましては必ず保証書をご提示ください。詳細は下記保証規定をご参照ください。

mondiale kinmaku beat KB1

持込修理

保証期間(本体)		お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日		年 月 日		
お客様	ご住所			
	お名前	様		
	電 話 () -			
販売店	住所・販売店名 () -			

※記入漏れや保証書を改ざんした場合、保証書および品質保証規程は無効となり、適用されません。

保証規定

- 取扱説明書の記事内容に従った正常な使用状態で保証期限内に故障した場合、お買い上げ日から一年以内は無償で修理・交換いたします。
- 修理ご依頼品の発送料および諸経費はお客様のご負担になります。
※ご発送される場合、傷が付かないように柔らかい紙や布で包んでダンボール箱に入れてください。
- 保証期間中はご購入元にご連絡の上、商品をご発送ください。保証の規程に従って対応させていただきます。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障および損傷
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - 使用中に生じたキズ、汚れ等外観上の変化
 - 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧、盗難等による故障および損傷
 - 落下等不注意、ならびに乱暴な扱いによる故障および損傷
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
 - 一般家庭以外(たとえば業務用等)に使用された場合の故障および損傷
- 本体以外の付属品は保証の対象外です。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。